




**БАНДАЖ
КОЛЕННОГО СУСТАВА
СОГРЕВАЮЩИЙ**





эластичные изделия

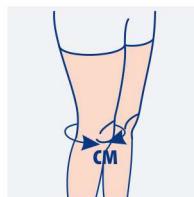

Размер №	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Окружность колена, см	28-30,5	30,5-33	33-36,5	36,5-39	39-41,5	41,5-44	44-46,5	46,5-49	49-51,5
Код Мориона	408685	408686	408687	408688	408689	408690	408691	408692	408693

Схема надевания:

1. примите удобное положение сидя или стоя;
2. поддерживающие ленты на бандаже должны быть справа и слева, узкая часть внизу;
3. надевать бандаж, как чулок.

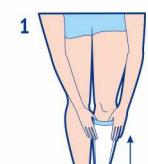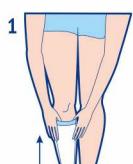

Mod. 802

БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА СОГРЕВАЮЩИЙ (Украинское производство)

Бандаж коленного сустава согревающий применяется при следующих патологиях: артриты, артрозы, деформирующие артрозы, легкие травмы и ушибы, легкие повреждения и растяжения связок, синовиты, бурситы, а также для профилактики травм и заболеваний при физических нагрузках. Согревающий наколенный бандаж можно использовать одновременно с компрессами - для усиления эффекта применяемых наружных лекарственных средств.

- Конструкция изделия разработана с учетом рекомендаций профильных врачей.
- Бандаж обеспечивает надежную плотную компрессию коленного сустава, способствует уменьшению болевых ощущений.
- Высокое содержание натуральных волокон в материале бандажа позволяет коже дышать и не вызывает раздражений.
- Материал изделия имеет в своем составе шерстяные нити, обеспечивает согревающий эффект изделия для улучшения кровообращения в тканях коленного сустава, укрепления сустава и нормализации тонуса мышц.

Назначение:

- нарушение функции коленного сустава;
- травмы коленного сустава;
- профилактика травм коленного сустава во время физических нагрузок;
- разболтанность сустава, которая сопровождается ощущением его нестабильности при ходьбе и описывается пациентом как «подгиб» или «выскакивание» колена;
- при болях при артрите, артозе, синовитах, бурситах;
- предупреждение отеков.

Преимущества:

1. Согревающий эффект.
2. Надежная фиксация коленного сустава.
3. Наличие больших размеров.
4. Произведено с использованием натуральных материалов.
5. Разработан в соответствии с рекомендациями врачей.
6. Сделано в Украине

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**